



Instructions pour l'utilisation du ciment Bandtite™ Band

1. **MESUREZ** les marges gingivales après le retrait des séparateurs.
2. **POLIR** la surface de l'émail qui doit être lié. Ne pas utiliser de pâtes de polissage qui contiennent de l'huile ou du fluor. Rincez soigneusement la dent puis séchez-la en utilisant de l'air comprimé sans huile et sans humidité. La corrosion de la dent avec de l'acide n'est pas nécessaire.
3. **FAITES UN ESSAI** d'ajustement des bandes liantes. Retirez et nettoyez les bandes. Lorsque vous utilisez des bandes photo-corrodées American Orthodontics, il n'y a pas besoin de rendre la surface interne encore plus rugueuse.
4. **ISOLEZ** la dent qui doit être liée.
5. **AGITEZ OU FAITES ROULER** le tube de poudre afin de mélanger son contenu de façon uniforme.
6. **VERSEZ** deux cuillerées de poudre dans un mortier en verre ou en plastique. Ne comprimez pas la poudre dans la cuillère. Remettez le couvercle sur le contenant de poudre immédiatement.
7. **AJOUTEZ** trois gouttes de liquide dans le mortier.
IMPORTANT: Maintenez la bouteille en position verticale et pressez très doucement lorsque vous ajoutez le liquide. Les gouttes devraient être ajoutées très lentement de façon à éviter de piéger de l'air et d'assurer une taille constante des gouttes.
8. **INTRODUISEZ** la poudre dans le liquide par petites quantités à la fois. De nouvelles quantités de poudre ne devraient pas être introduites dans la portion déjà mélangée tant et aussi longtemps que la portion n'est pas homogène. Le temps de mélange devrait idéalement être de 30 secondes, et ne pas excéder 45 secondes.
9. **REMP LISSEZ** la bande propre immédiatement et ajustez-la sur la dent sèche.

Les bandes doivent être dans leur position finale moins de 3 minutes après avoir commencé à faire le mélange. Ce délai de travail peut être augmenté légèrement (environ 20 secondes supplémentaires) si vous utilisez une dalle froide.

Le ciment en excès peut être nettoyé dans un délai s'étendant de 5 à 6 minutes après le positionnement des bandes.