



Instructions pour l'utilisation du mastic Eagle FluorSure™ (REF 001-915)

1. **PROPHYLAXIE:** Polir les surfaces d'émail qui doivent être liées. Ne pas utiliser de pâtes de polissage qui contiennent de l'huile ou du fluor. Rincez soigneusement la dent puis séchez-la en utilisant de l'air comprimé sans huile et sans humidité.
2. **CORROSION:** Isolez la dent. Étalez l'agent corrosif sur toute la surface devant être liée. Laissez l'agent de corrosion agir sur la dent pour un maximum de 60 secondes (120 secondes s'il s'agit d'une dent de bébé). Le temps de corrosion maximal devrait être de 30 secondes lorsque vous liez des crochets de céramique.
***Avertissement:** L'agent corrosif contient de l'acide phosphorique. Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les tissus. En cas de contact, rincez abondamment avec de l'eau et obtenez de l'aide médicale dans le cas d'un contact avec les yeux.
3. **RINCEZ ET SÉCHEZ:** Rincez abondamment chacune des dents pendant au moins 20 secondes. À partir de ce moment, ne laissez pas le patient se rincer la bouche ou contaminer la surface de l'émail. Isolez la dent à nouveau et séchez-la soigneusement. La surface où a été appliqué l'agent corrosif devrait avoir une apparence blanc givré. Si ce n'est pas le cas, répétez le processus de corrosion pendant 20 secondes supplémentaires.
4. **BIEN AGITEZ** la bouteille de Eagle FluorSure et en verser une petite quantité.
5. **BROSSEZ** une **MINCE** couche de scellant sur la surface d'émail qui a été corrodée.
6. **(Étape optionnelle) ASSÉCHEZ** l'Eagle FluorSure pour une durée de 10 à 15 secondes par dent si vous utilisez une lampe de séchage halogène et pour une durée de 5 à 10 secondes par dent si vous utilisez une lampe de séchage DEL ou tout autre type de lampe à alimentation élevée. Placez l'embout lumineux aussi près que possible de la surface de la dent sans, dans la mesure du possible, la toucher.
Le séchage du FluorSure avant l'application des crochets est optionnel, mais rend le nettoyage de l'excès d'adhésif beaucoup plus facile.
7. **POSITIONNEZ FERMEMENT** le crochet sur la surface de la dent. Retirez tout excès d'adhésif. Si nécessaire, ajustez la position des crochets.
8. **CONCERNANT LES CROCHETS DE MÉTAL: ASSÉCHEZ** l'adhésif des deux côtés, que ce soit en combinaison occlusale/gingivale ou mésiale/distale, pour la durée qui est recommandée par le fabricant de votre lampe de séchage, généralement de 10 + 10 sec = 20 sec au total avec une lampe halogène et de 5 + 5 sec = 10 sec au total pour les lampes à haute puissance.

Vous pouvez aussi, alternativement, assécher l'adhésif en positionnant l'embout de la lampe dans une position inter proximale entre chaque dent pour une durée de 20 secondes s'il s'agit d'une lampe halogène ou de 10 secondes s'il s'agit d'une lampe à haute puissance.

CONCERNANT LES CROCHETS DE CÉRAMIQUE OU DE PLASTIQUE: ASSÉCHEZ à travers la surface faciale du crochet, pour une durée de 10 secondes s'il s'agit d'une lampe halogène ou de 5 secondes s'il s'agit d'une lampe à haute puissance.