



Agent corrosif acide (REF 001-903, 001-912, 001-913)
Instructions pour l'utilisation

1. **ISOLEZ** les dents.
2. **ÉTALEZ** l'agent corrosif sur toute la surface devant être liée. Une surface légèrement plus importante que celle de la plage de liaison doit être corrodée. Laissez l'agent corrosif agir pour un maximum de 60 secondes par dent (120 secondes pour les dents de bébé). Le temps de corrosion maximal devrait être de 30 secondes lorsque vous liez des crochets de céramique.
3. **RINCEZ** abondamment chacune des dents pendant au moins 20 secondes.
4. **RÉ ISOLEZ** les dents puis asséchez-les soigneusement en utilisant la seringue à air.
5. **ASSUREZ-VOUS** que les dents ne se fassent pas contaminer avec de l'eau, du sang ou de la salive. Si une contamination se produit, rincez, ré-isolez et asséchez consciencieusement les dents à nouveau.

La surface où a été appliqué l'agent corrosif devrait avoir une apparence blanc givré. Si ce n'est pas le cas, réappliquez de l'agent corrosif pour une durée supplémentaire de 20 secondes, rincez puis asséchez la dent soigneusement.