



Instructions pour l'utilisation de l'adhésif de liaison No Mix: 30™

1. **PROPHYLAXIE:** Polir les surfaces d'émail qui doivent être liées. Ne pas utiliser de pâtes de polissage qui contiennent de l'huile ou du fluor. Rincez soigneusement la dent puis séchez-la en utilisant de l'air comprimé sans huile et sans humidité.
2. **CORROSION:** Isolez la dent. Étalez l'agent corrosif sur toute la surface devant être liée. Laissez l'agent de corrosion agir sur la dent pour un maximum de 60 secondes (120 secondes s'il s'agit d'une dent de bébé). Le temps de corrosion maximal devrait être de 30 secondes lorsque vous liez des crochets de céramique.
***Avertissement:** L'agent corrosif contient de l'acide phosphorique. Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les tissus. En cas de contact, rincez abondamment avec de l'eau et obtenez de l'aide médicale dans le cas d'un contact avec les yeux.
3. **RINCEZ ET SÉCHEZ:** Rincez abondamment chacune des dents pendant au moins 20 secondes. À partir de ce moment, ne laissez pas le patient se rincer la bouche ou contaminer la surface de l'émail. Isolez la dent à nouveau et séchez-la soigneusement. La surface où a été appliqué l'agent corrosif devrait avoir une apparence blanc givré. Si ce n'est pas le cas, répétez le processus de corrosion pendant 20 secondes supplémentaires.
4. **VERSEZ** une petite quantité de l'activateur/scellant.
5. **APPLIQUEZ** une **MINCE** couche sur la base du crochet et sur les surfaces d'émail corrodé.
6. **VERSEZ** une petite quantité d'adhésif No Mix: 30 directement sur la base de liaison du crochet. Faites pénétrer l'adhésif dans le filet.
7. **POSITIONNEZ FERMEMENT** le crochet sur la surface de la dent. Retirez tout excès d'adhésif. Vous avez à votre disposition jusqu'à 30 secondes pour positionner le crochet comme il convient.
8. **PLACEZ** le fil d'arche métallique dans les 7 minutes suivant la pose du crochet.

NOTES: Un excès d'activateur qui est appliqué sur la dent ou la base du crochet résultera en un glissement du crochet et/ou une réduction de la force du lien. Ne touchez pas avec la pointe d'une seringue la bande de liaison du crochet activée ou la dent. Cela causerait l'initiation de la polymérisation de l'adhésif encore dans la seringue. Si l'apparition de produit blanc opaque se fait dans la bouteille d'Activateur, c'est qu'une contamination croisée avec de l'adhésif est survenue et l'activateur doit être remplacé.
Adhésif et Activateur: Évitez tout contact répété ou prolongé avec la peau. Nettoyez soigneusement avec de l'eau et du savon après tout contact. Si une irritation apparaît, en arrêter l'utilisation.