



## **Instructions pour l'utilisation d'un agent hydratant pour porcelaine (REF 001-966)**

- 1. PROPHYLAXIS:** Polir les surfaces d'émail qui doivent être liées. Ne pas utiliser de pâtes de polissage qui contiennent de l'huile ou du fluor. Rincez soigneusement la dent puis séchez-la en utilisant de l'air comprimé sans huile et sans humidité.
- 2. APPLIQUEZ** une mince couche d'agent corrosif acide sur la porcelaine et attendez de 60 à 90 secondes.
- 3. LAISSEZ** l'agent corrosif acide sur la porcelaine et appliquez une couche de base pour porcelaine sur la couronne.
- 4. APPLIQUEZ** une deuxième couche de base pour porcelaine sur la couronne et laissez le produit en place sans y toucher pour une période de 60 secondes.
- 5. RINCEZ et FAITES SÉCHER** soigneusement la porcelaine.

La surface de porcelaine est maintenant prête pour le positionnement du crochet. La suite de la procédure de liaison demeure la même que dans le cas d'une dent naturelle.